



# Tabouret de douche rond

*Item no.*  
*Art.Nr:*       **302063 & 302064**  
*Varenr.*  
*Codice*

## User manual



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
www.mobilex.dk

## Tabouret de douche rond

### Description et utilisation prévue

Le tabouret de douche rond est un dispositif médical destiné à fournir un soutien stable et facile à l'assise lorsque la personne handicapée utilise la douche. Il possède un cadre en aluminium avec des pieds réglables en hauteur et une assise ronde en plastique blanc.

### Informations de sécurité importantes

Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne restez pas sur l'appareil. Assurez-vous que les jambes sont réglées à la même hauteur. Utilisez l'appareil uniquement en bon état technique. Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et lisse avec les 4 pieds placés de manière stable sur la surface. Toujours vérifier la stabilité de l'appareil avant utilisation.

### Description de l'assemblage et de l'utilisation

Le dispositif 302064 est livré assemblé, les quatre pieds étant réglés sur la position la plus basse. Ajustez la hauteur de l'assise du tabouret à la taille de l'utilisateur en appuyant sur les boutons-poussoirs situés sur les pattes du tabouret et en réglant les pattes à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur et que les boutons des 4 pieds sont bien verrouillés.

### Différence et assemblage de l'article 302063

Le tabouret de douche avec l'article no. 302063 est le même produit que 302064, mais il est livré démonté. Le paquet est livré avec 2 jeux de pieds (A et B), 1 siège rond blanc (D) et 5 vis avec 5 rondelles (C). Pour l'assembler, fixez les pieds sous le siège, comme indiqué sur la photo page 4. Prenez le siège blanc et posez-le à l'envers sur une table. Positionnez les pieds en veillant à positionner le pied A sous le pied B. Insérez 1 des 5 rondelles sur chaque vis, puis mettez les vis dans les 5 trous situés sous le siège et fixez les vis. Veillez à ce que toutes les jambes soient fixes et stables, puis tournez le tabouret de douche sur le sol. Vérifiez et réglez les jambes à la hauteur souhaitée, comme décrit ci-dessus.

### Nettoyage et entretien

La saleté normale sur les pièces métalliques et plastiques peut être enlevée avec des agents de nettoyage standard et un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

Données techniques	
Dimension	Ø 33 cm
Hauteur d'assise	35,5 – 53,5 cm
Poids Max de l'utilisateur	130 kg
Poids du produit	1,66 kg

## Déclaration de conformité (CE)

La société Mobilex A / S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danemark, déclare que:

Tabouret de douche rond Mobilex  
N ° d'article 302063 et 302064

est conçu et fabriqué conformément à la documentation technique qui satisfait aux exigences de base suivantes:


Directive Directive du Conseil de l'UE 93/42 / CEE sur les équipements médicaux

## Garantie

Mobilex A / S offre 2 ans de garantie pour les dommages causés par des erreurs de production ou des erreurs matérielles. La garantie n'est pas valable pour une réparation ou une utilisation non prévue du produit. Les pièces sujettes à une usure normale ne sont pas couvertes par la garantie, sauf si l'usure est causée par un défaut de fabrication. Si des modifications de produit sont effectuées sans notre acceptation écrite, le marquage CE et la garantie du produit ne seront pas valables. En cas de dommages au produit couverts par cette garantie, veuillez en informer votre revendeur ou Mobilex A / S directement. La garantie ne couvre pas les frais de transport et n'inclut pas de compensation pour les blessures corporelles ou la non utilisation du produit lors de la réparation. La garantie ne couvre pas les dommages dus au non-respect du manuel d'utilisation.

Lars Nygaard  
Managing director  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 29th August 2017

Example of the product label

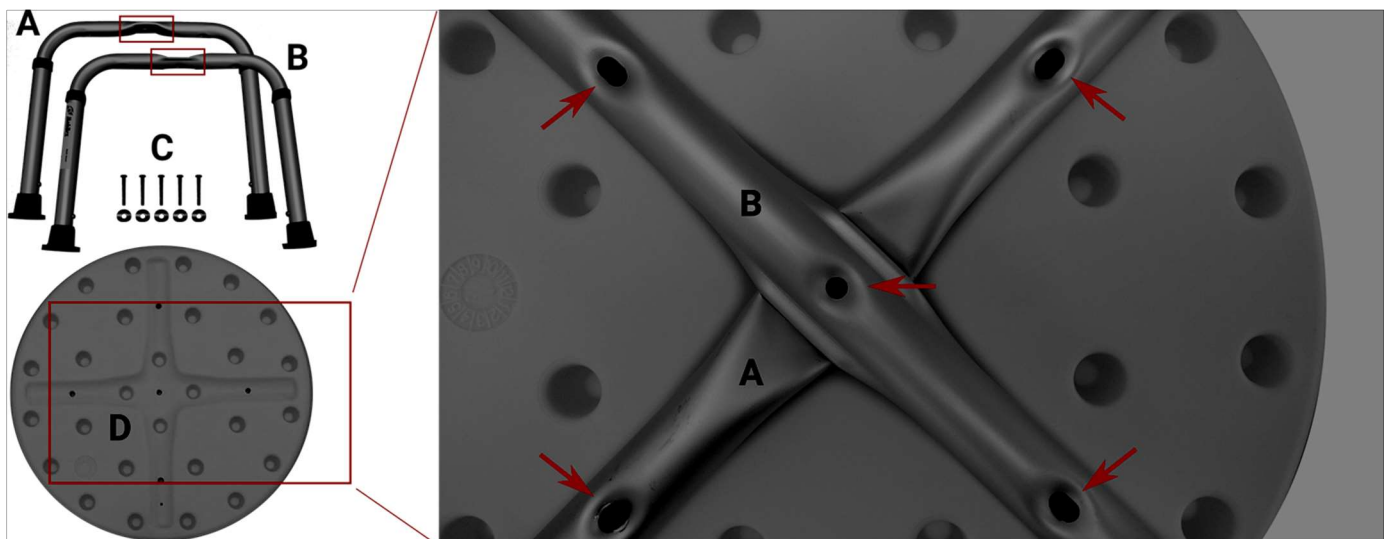

Assembly of the 302063